

機能訓練用パチンコラック

設置のご案内 | 開梱から台の設置まで

作業を始める前に

- ・電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ・台は重いため、持ち上げる作業は必ず2人以上で行ってください。
- ・平らで安定した場所にラックを置いて作業してください。

1 梱包の段ボールを外す




ラックを覆っている段ボールを取り外します。

写真は左から、

- ① 到着時の状態
- ② 段ボールを外した正面
- ③ 段ボールを外した側面です。

2 天板（ラックの一番上の板）を外す

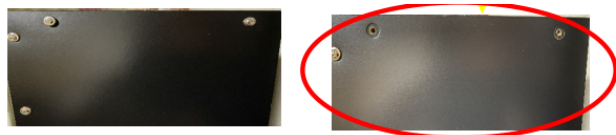

ラックの左右の側面にある、上部のネジを2本ずつ外してください。

左右とも外したら、天板を取り外します。

外したネジと天板は、なくさないように保管してください。

3 パチンコ台をラックに入れる



2人以上で台を支えながら、ラック内に台を入れてください。

指や電源コードを、台とラックの間に挟まないように注意してください。

※写真では台が点灯していますが、設置作業中は必ず電源を切ってください。

機能訓練用パチンコラック

設置のご案内 | 固定と使用前の確認

4 パチンコ台をネジで固定する



写真は、天板を外したラックを上から見た状態です。

写真の丸印を参考に、台をネジで固定してください。

固定用のネジは、ラック下部の棚にあります。


固定位置が分からない場合は、作業を止めて当社へご連絡ください。

5 天板を戻し、設置状態を確認する

外した天板を元の位置に戻し、手順2で外したネジで取り付けてください。
台とラックにぐらつきがなく、ネジに緩みがないことを確認してください。
電源コードが挟まっていないことを確認してから、電源を入れてください。

補足 | ネジでの固定が難しい場合

台の上部や側面の隙間に段ボールを差し込み、動きを抑える方法もあります。
ネジ固定と同じ強度を保証するものではないため、使用前に当社へご相談ください。

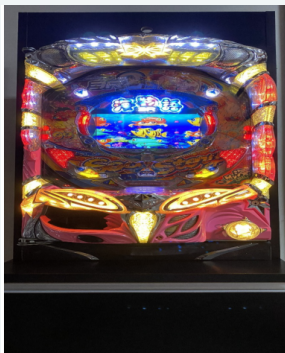

上部：差し込み前 → 差し込み例



側面：差し込み前 → 差し込み例



- ・段ボールを使う場合は、隙間に合う大きさに切って差し込んでください。
- ・到着時の梱包用段ボールを利用できます。写真は差し込み位置の例です。
- ・通気口や配線をふさがないようにしてください。
- ・台が動く、ぐらつく場合は使用せず、当社へご連絡ください。

設置方法が分からない場合は、作業箇所の写真を添えて当社へお問い合わせください。